


# Androidスマホをお使いの方で ハートサインとオムロンコネクートを連携利用されている皆様へ

OMRON connectアプリのサービス提供が **2026年8月末で終了** いたします。

現在、OMRON connectからハートサインアプリへ血圧等データ取得・連携を設定している方は、**2026年8月までにGoogleの「ヘルスコネクト」アプリからデータを取得するよう設定の変更が必要**となります。

これまで

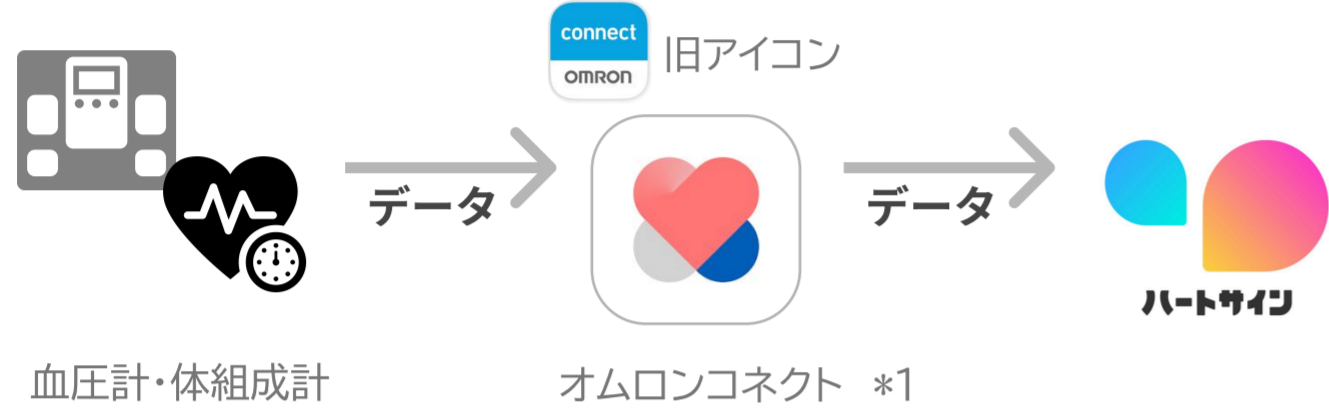

2026年9月以降



\*1 オムロンコネクトアプリのアイコンデザインが2026年5月に変更されました。  
\*2 「ヘルスコネクト」とは、Googleが提供し、歩数や運動量などの健康情報をまとめて管理できる無料アプリです。様々な健康アプリやウェアラブル端末からデータを集約できるため、ご自身の健康状態を総合的に把握できます。

この「通信機器設定」画面で現在  
**ヘルスコネクト:未連携**  
**オムロンコネクト:連携中**  
となっている方は、  
①～③の設定が必要です！

## 設定方法


- 1 スマートフォンのカメラアプリで右記のQRコードを読み取り、ハートサインアプリを最新版に更新します。
- 2 ヘルスコネクトとハートサインを連携する



①ハートサインアプリを開き、「メニュー」>「通信機器設定」をタップ

②「ヘルスコネクト」の「通信設定へ」をタップし、次の画面で「連携する」をタップ

③「すべて許可」をオンにして「許可する」をタップ

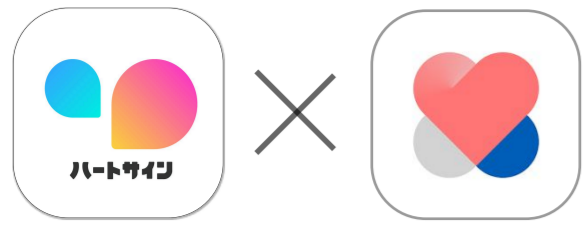

# Androidスマホをお使いの方で ハートサインとオムロンコネクトを連携利用されている皆様へ



ヘルスコネクトがインストールされていない場合は、確認メッセージが表示されます。メッセージに従ってストアからインストールし、「使ってみる」をタップした後、ハートサインアプリへ戻ってもう一度「連携する」をタップしてください。




正常に連携が完了すると「連携中」と表示されます

## 3 OMRON connect とヘルスコネクトを連携する

\*アイコンデザインが2026年5月に変更されました。




① OMRON connect アプリを起動し、右下の「その他」をタップ

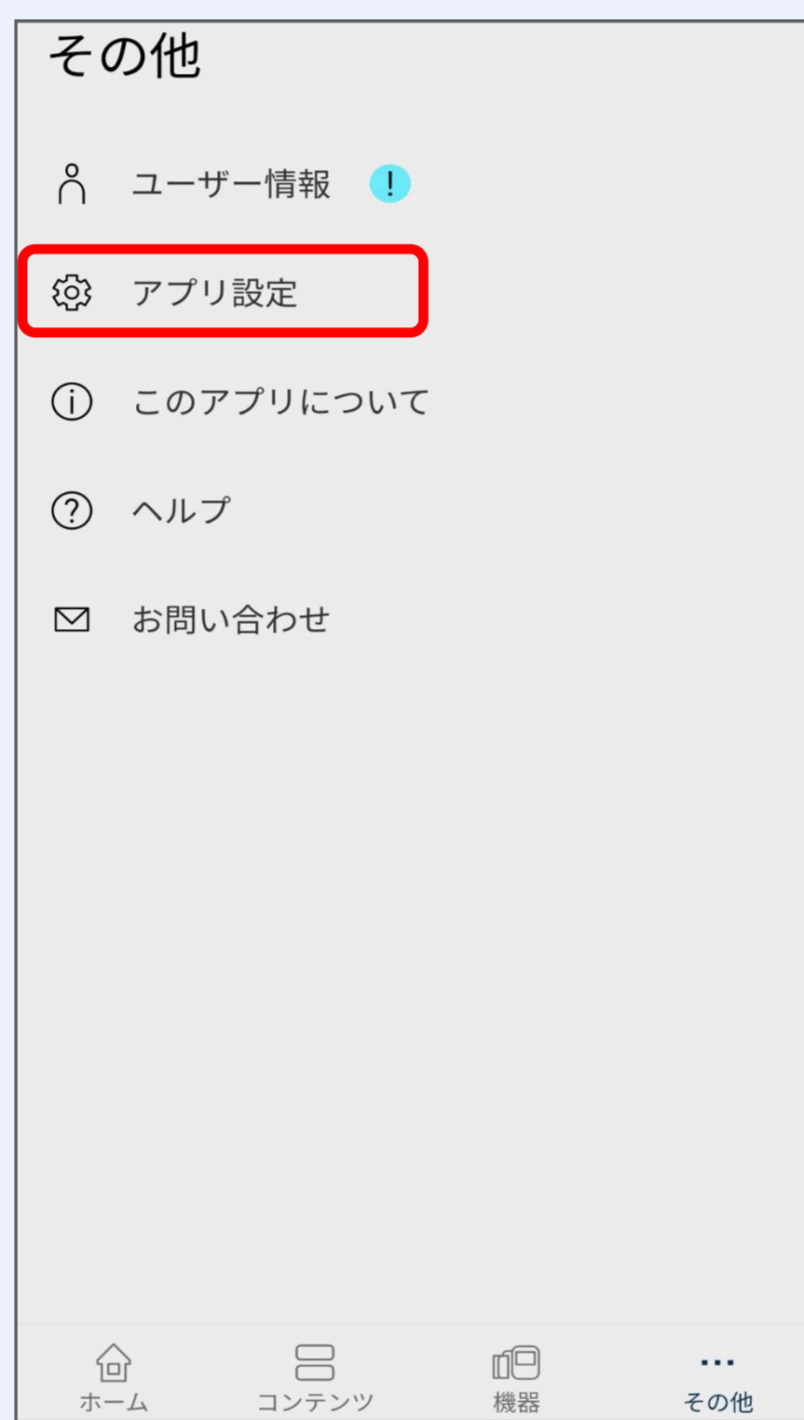

② 「アプリ設定」をタップ




③ 「ヘルスコネクト連携」を選択

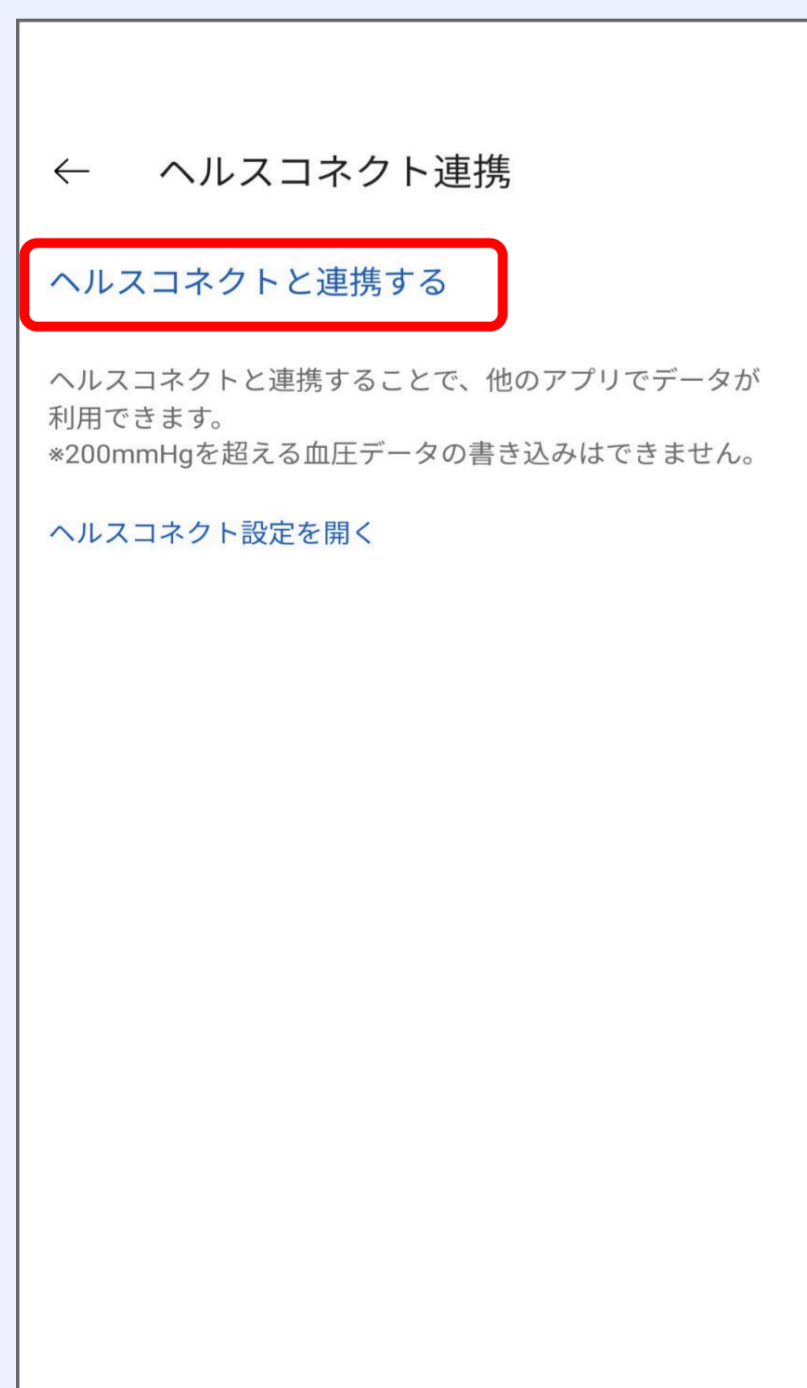


④ 「ヘルスコネクトと連携する」をタップ



⑤ 「すべて許可」をオンにしてすべての権限を許可

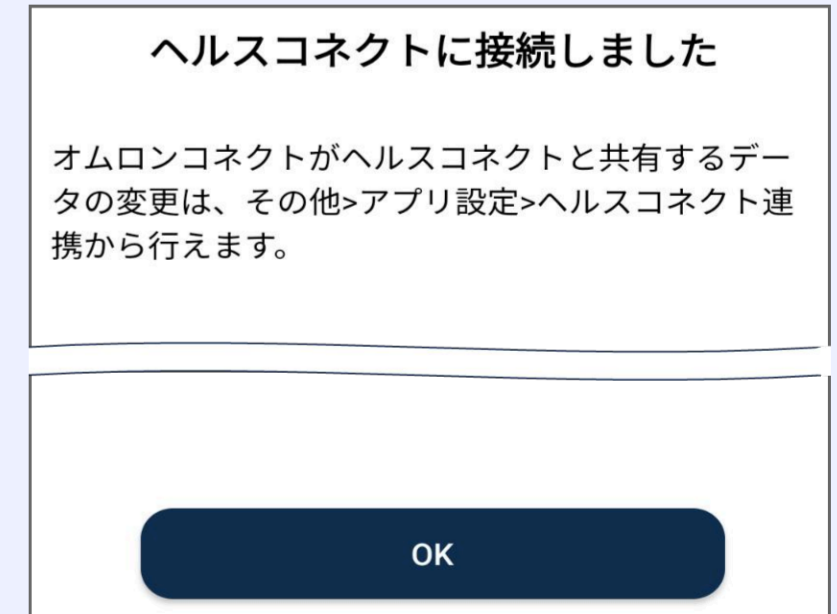

⑥ 「OK」をタップして完了

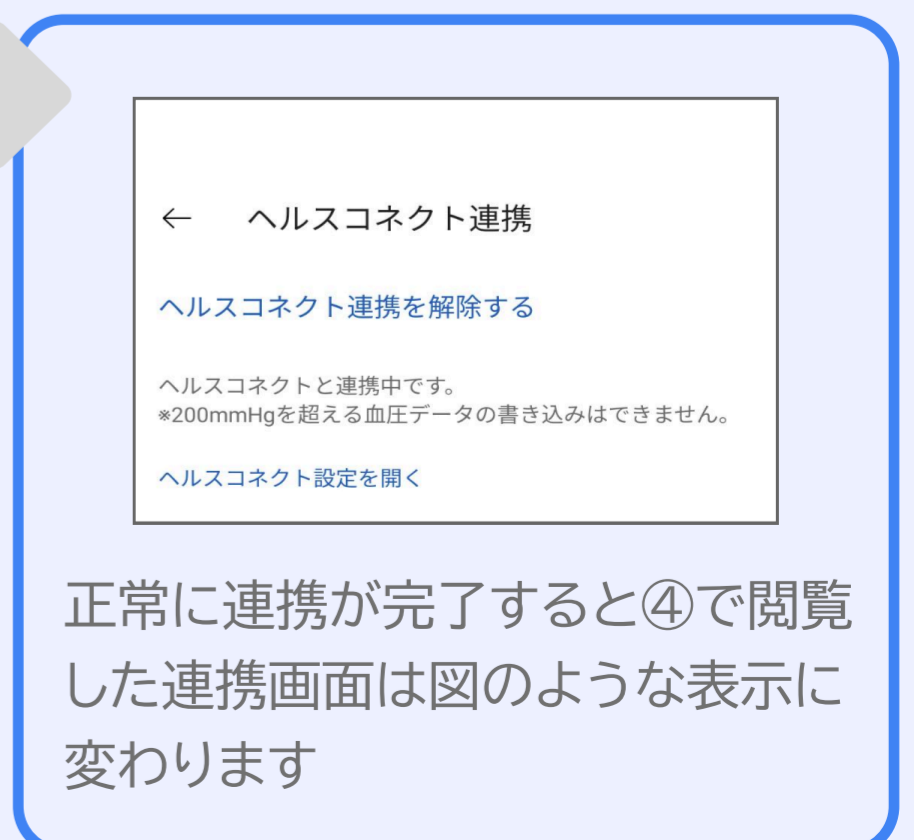

正常に連携が完了すると④で閲覧した連携画面は図のような表示になります